

ディスポーザブル  
スパンレース

フォーケア タオル

大判  
タイプ

- 丈夫で柔らかい使い捨てタオル -



医療・介護・福祉理美容の現場に・・・  
サービスと衛生管理の質を向上

フォーケア タオル【BL-DFT】

希望小売価格

業務 販売単位：1箱/100枚×8袋

一般：1袋/100枚 3,000円 [税別] @30

高齢者や障がいのある方々の超高齢化・・・ 衛生対策は・・・

体力や免疫力の低下した方々への、安全・安心・快適な  
サービス提供に衛生管理は欠かせない重要な課題です。

【使用事例：未滅菌です。使用できる範囲でご活用ください。】

- 滅菌** ガーゼの上から、浸出液を受けるカバー（保護）に使用等。
- 胃ろう** 周辺の清潔。栄養剤の漏れを受ける・・・シーツを汚さない。
- 手・足** 等に、伸縮を活かして巻きつけて使用する・・・等。
- 美容・理容** 整髪タオル：刈毛が繊維に絡み背中に入り難く衛生的。
- 配膳** テーブル拭き等として使用。・・・汚れが目立ったらディスポ。
- 清掃** モップに合わせて取替シートに。アルコールなど噴霧可。



展開サイズ：500mm×600mm  
※誤差：±10mm  
素材：レーヨン・PET 不織布

ご使用上の注意

- 目および目のまわりには使用しないでください。 ●お肌に異常のある場合やお肌に合わない場合は、ご使用しないでください。
- 電子レンジ等でのご使用では、必要以上の過熱はご遠慮ください。 ●必要以上の加熱、おしぼりウォーマー内での放置はご遠慮ください。
- 注：流しや水洗トイレには流さないでください。 水に溶けにくいいため、パイプ詰まりの原因になります。

2020.3.10作成

お問い合わせ先：販売元



有限会社ビューティフルライフ

TEL:097-546-0666

〒870-0829 大分県大分市権迫4組の2

e-Mail : info@be-life.info

Web : http://www.be-life.info

# フォーケア® タオル

ディスポタイプ / スパンレース

●医療・介護・福祉理美容の現場で、使用されています。【未滅菌です】



## 特徴

- 十分に伸ばすと…汚れや埃の付着がアップします。
- お掃除シートとして…掃除モップ、台拭き等に使用。
- 通常のタオル等として…洗って繰り返し使用できます。
- 綿タオルと比較…汚れ吸着は良い。吸水性は落ちます。

1箱 : 800枚 (8袋)  
1袋 : 100枚入

サイズ:  
約600mm × 約500mm

※寸法誤差: ±10mm

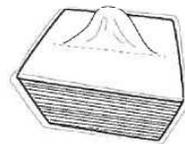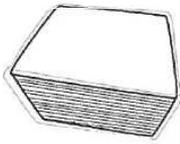

(1)1袋100枚入。(2)中央ミシン目を開きます。(3)ミシン目から引き出します。 <<伸びる側:約500mm>> <<伸びない:約600mm>>

## 導入事例

医療機関…創傷ケア等患部処置で滅菌ガーゼの上から浸出液のカバー(保護)用として使用する等。  
胃ろう周辺の清潔や栄養剤の漏れを受けてシーツをガード。【注:未滅菌で使用可能な範囲】  
訪問看護…手・足などに伸ばしながら圧をかけて巻く等。 家族が療養者用に洗濯して数回使用する。  
介護施設…配膳用、テーブル拭き等として繰り返し使用し目視で汚れが目立ったらディスポする。  
訪問理美容…整髪用タオル等で使用。刈り毛が繊維に絡み背中に入り難く衛生的。 清掃シートに使用。  
病院・施設・在宅…掃除モップの大きさに合わせて取替シートとして使用。アルコール等を噴霧して使用。


タオルの大きさは、使用用途に応じて自由にカット出来ます。 ※以下、カット例

伸びる側/伸びない側を確認して、用途に応じて切ってください。


【注意】1/2、1/3、1/6に切る場合、方向により伸縮する面が違います。




<<1/2カット>>

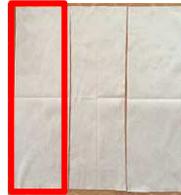


<<1/3カット>>

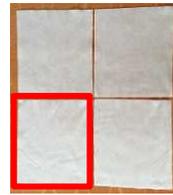

<<1/4カット>>

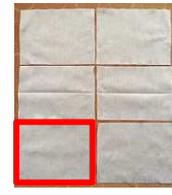

<<1/6カット>>

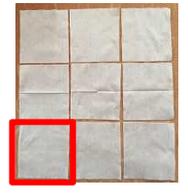

<<1/9カット>>

### 使用例① 厚手タオルとして



●タオルを伸びる方向に引っ張り十分に広げて、大判タオルや厚手のタオルとして使用する。


### 使用例② 薄手タオルとして



①伸びる方向、伸びない方向を確認して、用途に応じてカット。



②伸びる方向に十分に伸ばすと汚れや埃の付着や吸水性がUPします。

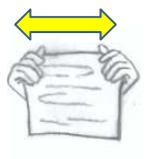

### 使用例③ 手で裂く(切る)



●伸びない側から、手で裂けます。⇒点線の赤矢印自由裂いて使用できます。

必要に応じて小さく切ったタオルを、別のビニール袋に詰め替えると使い勝手が良いです。



●取出し面に、ハサミやミシン目カッターで切れ込みを入れると便利です。